

# VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Resultados brilhantes e fiéis à cor. Sempre.



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 11.19



VITA – perfect match.

**VITA**

A close-up, soft-focus photograph of a woman's face, showing her eyes, nose, and a slight smile. She has dark hair and is wearing a yellow top. The background is a plain, light-colored wall.

## CONCEITO E VANTAGENS

**VITA AMBRIA®** PRESS SOLUTIONS é um sistema de prensagem altamente estético para resultados vibrantes e naturais. Além de uma ótima fidelidade à cor e excelente dinâmica de luz, a cerâmica de prensagem se destaca por seu processamento eficiente.



▶ VITA AMBRIA –  
Brilhante. Fiel à cor Adequação perfeita.



## VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – NATURAL, FIEL À COR, DE CONFIANÇA



VITA AMBRIA –  
Sistema de prensagem  
para resultados estéticos  
e duradouros.



### O quê?

- Sistema cerâmico de prensagem de dissilicato de lítio reforçado com dióxido de zircônio para resultados altamente estéticos e duradouros por meio de processamento eficiente

### Para quê?

- Para a produção de reconstruções delicadas, como facetas, inlays/onlays, bem como coroas totais/parciais e pontes de três elementos altamente estéticas até o 2.º pré-molar

### Com o quê?

- O sistema cerâmico de prensagem compreende pastilhas de cerâmica de prensagem em dois níveis de translucidez (T/HT) e dois tamanhos (S, L), sistema de mufla, massa de revestimento e líquido, bem como êmbulos de prensagem



## O SISTEMA DE PENSAGEM COM COMPONENTES ADEQUADOS



### VITA AMBRIA®

- Para um processamento consistentemente eficiente e confiável, existem componentes de sistema perfeitamente compatíveis para cada etapa, desde a integração do sistema, passando pela prensagem até o recobrimento.



DETERMINAÇÃO DA COR



MODELAGEM



INCLUIR



PRENSAGEM



RECOBRIMENTO\*



COLORAÇÃO



POLIR



VITA AMBRIA –  
Eficiência com sistema.

\*) Etapa opcional do processo: não é necessária para restaurações monolíticas.

## AS VANTAGENS



▶ **VITA AMBRIA** –  
Esteticamente fascinante,  
de confiança e adequação  
perfeita.

### **Brilhante**

- Reprodução brilhante e multifacetada do jogo de cor e luz graças ao material e sua translucência, opalescência e fluorescência próximas ao natural.

### **Fiel à cor**


- Reproduza as cores dos dentes de forma confiável graças às pastilhas de prensagem com excelente fidelidade de cores e componentes de sistema perfeitamente harmonizados

### **Eficiente**

- Alcance de maneira eficiente, resultados de prensagem sob medida através de camada de reação minimizada graças à harmonização ideal do material e à massa de revestimento

### **Duradouro**

- Restaurações altamente duradouras graças à cerâmica de dissilicato de lítio reforçada com dióxido de zircônio de altíssima resistência (> 500 MPa)

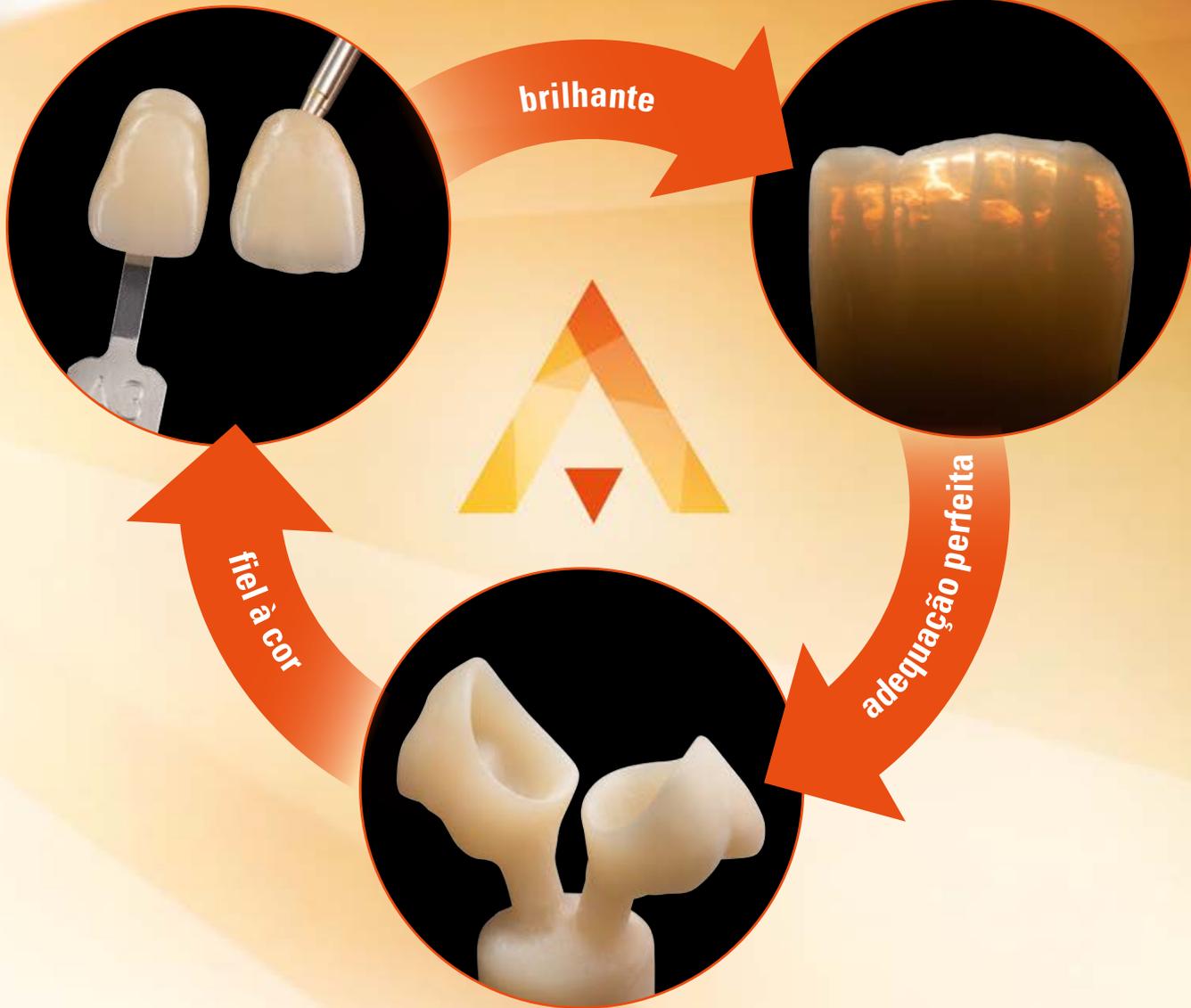

## EXCELENTE DINÂMICA DE LUZ PARA RESTAURAÇÕES ALTAMENTE ESTÉTICAS

VITA AMBRIA –  
Para um jogo de cores e  
luz multifacetado.



### VITA AMBRIA®

- conta com uma translucidez natural para a melhor transmissão de luz
- possui opalescência integrada para um jogo de cores brilhante
- proporciona uma autofluorescência próxima ao natural para um excelente jogo de luz



▶ melhor transmissão de luz




▶ jogo de luz brilhante




▶ fluorescência próxima ao natural



## REPRODUÇÃO CONFIÁVEL E EFICIENTE DAS CORES DOS DENTES

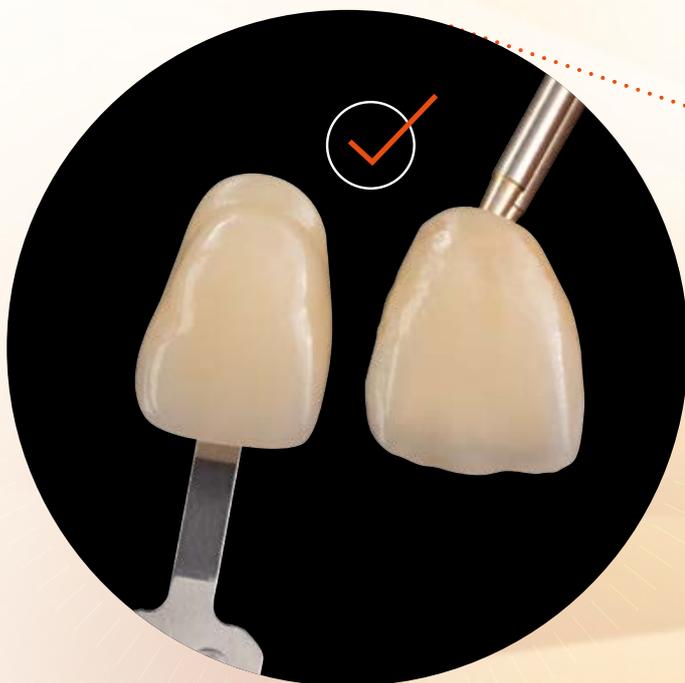

◀ **VITA AMBRIA – perfect match.**  
Reprodução de cor confiável graças às pastilhas de prensagem com a melhor confiabilidade de cor.

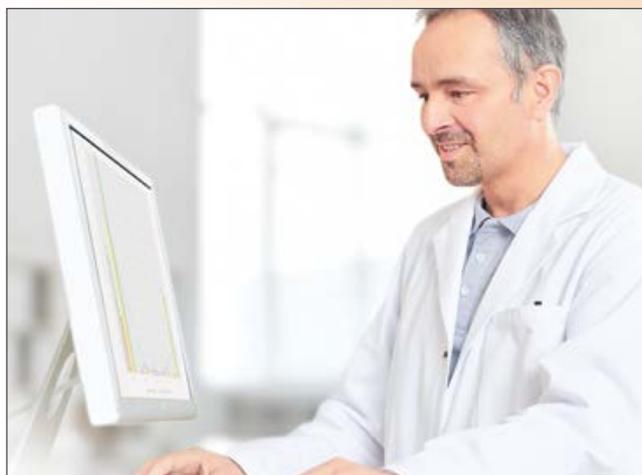



### Receita de cor precisa

- Graças aos métodos metrológicos de alta precisão, uma fidelidade de cores muito alta é alcançada durante o desenvolvimento e a produção das pastilhas de prensagem VITA AMBRIA.



### Determinação precisa da cor

- Com os sistemas de determinação de cores visual e digital da VITA Zahnfabrik, é possível determinar as cores dos dentes com alta precisão.

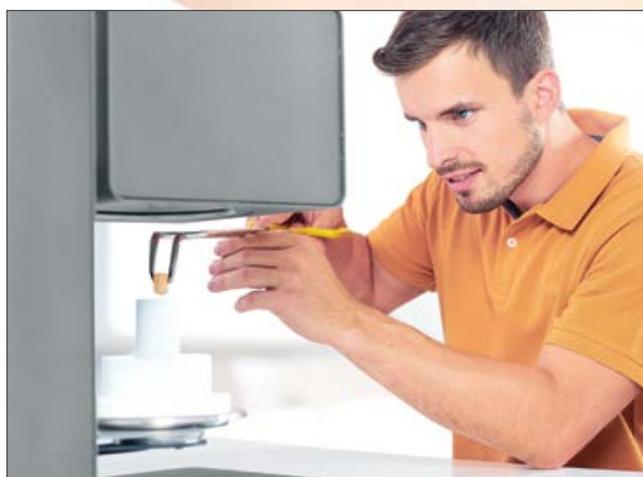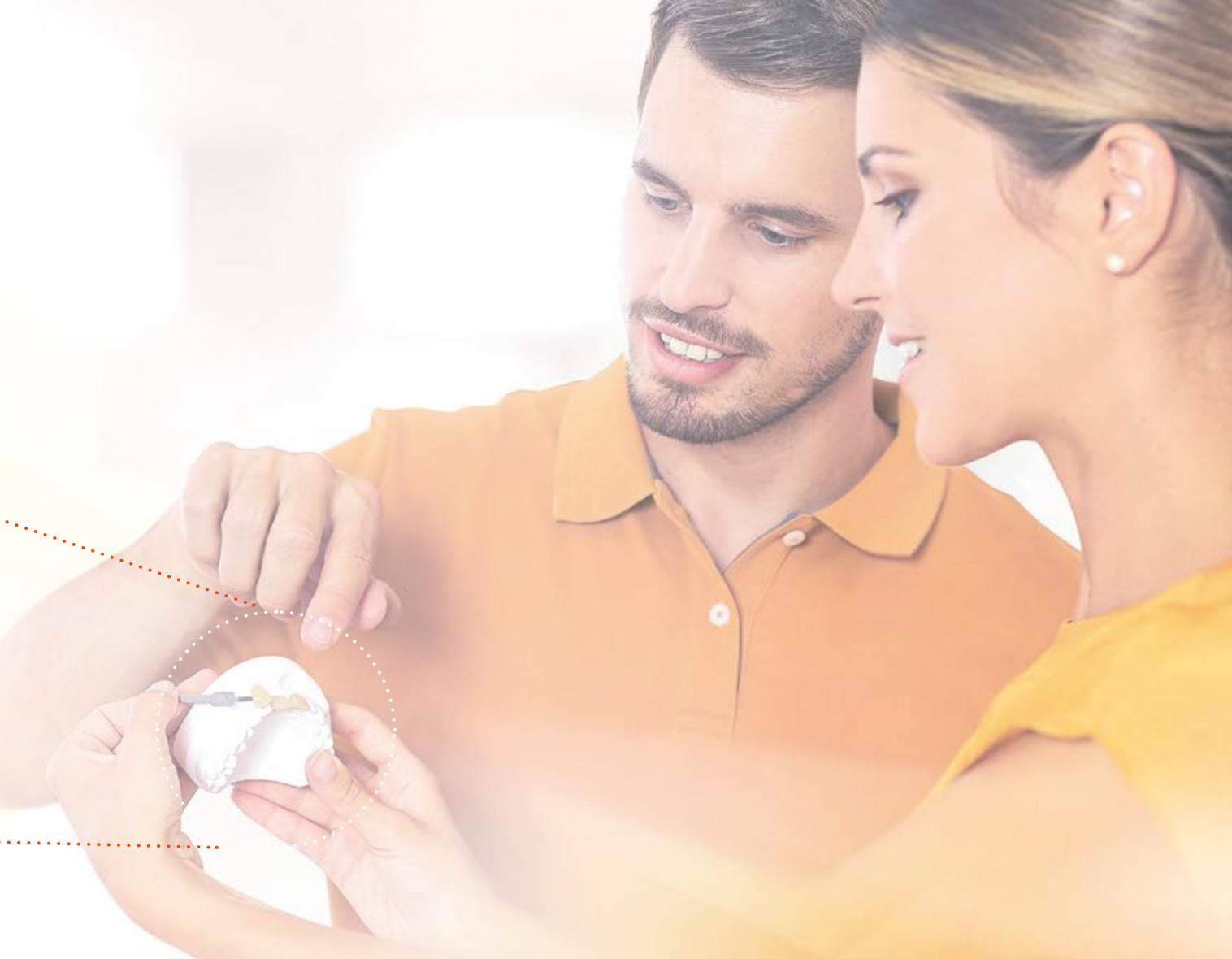

### Reprodução precisa da cor

- Informações precisas sobre a cor dos dentes e pastilhas de prensagem altamente fiéis às cores permitem a reprodução de cores eficiente e confiável.



## RESULTADOS PERFEITAMENTE ADEQUADOS E EFICIENTES



Cerâmica de prensagem VITA AMBRIA

### VITA AMBRIA®

- Possibilita resultados de prensagem de adequação perfeita por meio de uma camada de reação minimizada, pois o material e a massa de revestimento são harmonizados de maneira ideal
- Permite uma finalização eficiente, uma vez que a camada de reação mínima pode ser decapada com rapidez e facilidade sem necessidade de tratamento posterior com banho de ácido



Massa de revestimento e líquido VITA AMBRIA



Massas de revestimento harmonizadas  
Sem camada de reação



Massa de revestimento convencional  
Com camada de reação




## ESTABILIDADE E POLIBILIDADE EXCEPCIONAIS

### 1. Resistência altíssima para uma estabilidade excelente



Resistência biaxial

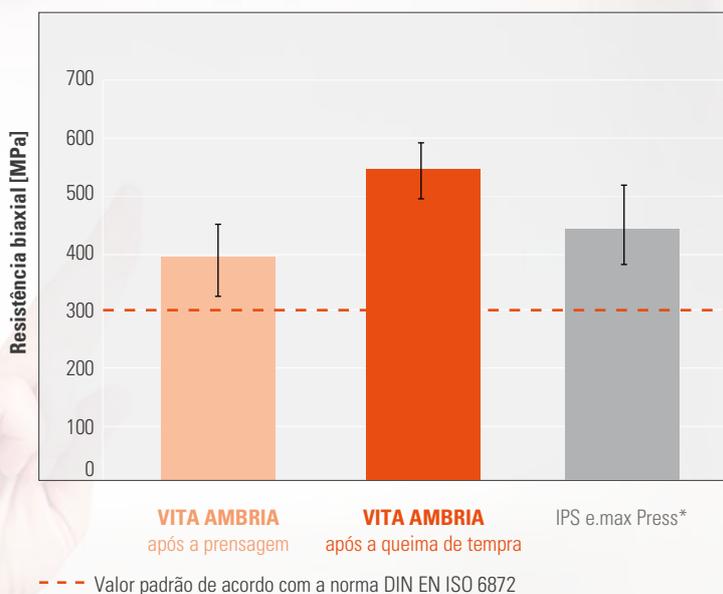

Fonte: Pesquisa interna, VITA P&D, Medição da resistência biaxial do materiais mencionados em correspondência à norma ISO 6872 (com geometria de ensaio modificada), (Gödikler, 1/2019, [1] consulte o verso do folheto)

\*) Nível de resistência após o processo de prensagem. Uma queima de tempra não é especificada pelo fabricante.


#### VITA AMBRIA®

- Graças à sua altíssima resistência, é possível contar com uma excelente estabilidade clínica a longo prazo
- Alcança com uma força biaxial de, em média, > 500 MPa (após a queima de tempra) um nível de resistência acima dos requisitos padrão

## 2. Polibilidade eficiente para um excelente brilho

### 1. Processamento com diamante

Superfície após o tratamento com fresa diamantada

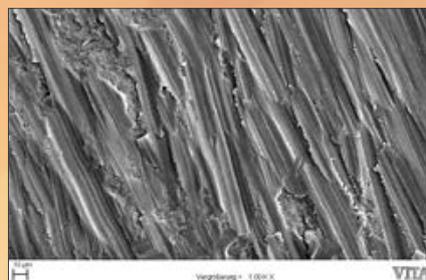


### 2. Polimento grosso

Superfície após o tratamento com polidor grosso



### 3. Polimento fino

Superfície após o tratamento com polidor fino

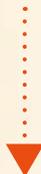

**VITA AMBRIA –**  
Obtenção de alto brilho  
com rapidez e eficiência.

Fonte: Pesquisa interna, VITA P&D, Imagens MEV da superfície tratada da amostra de VITA AMBRIA, imagem aumentada 1.000 vezes (Gódiiker, 8/2019 [1], consulte o verso do folheto)

### VITA AMBRIA®

- Graças a uma microestrutura homogênea, permite um polimento altamente eficiente com alto brilho
- Apresenta superfícies homogêneas e lisas, sem defeitos, após três etapas de tratamento (tratamento de diamante, polimento grosso e fino)




A close-up photograph of a man and a woman in profile, facing each other. The man is on the left, wearing an orange polo shirt, and the woman is on the right, wearing a yellow top. They appear to be in a conversation. The background is bright and out of focus.

## SISTEMA E COMPONENTES

As pastilhas de prensagem **VITA AMBRIA®** estão disponíveis em diferentes variantes e cores. Além disso, conta com inúmeros componentes de sistema harmonizados entre si. Conheça agora mesmo a gama completa de materiais disponíveis.



## RESUMO DAS VARIANTES, GEOMETRIAS E CORES

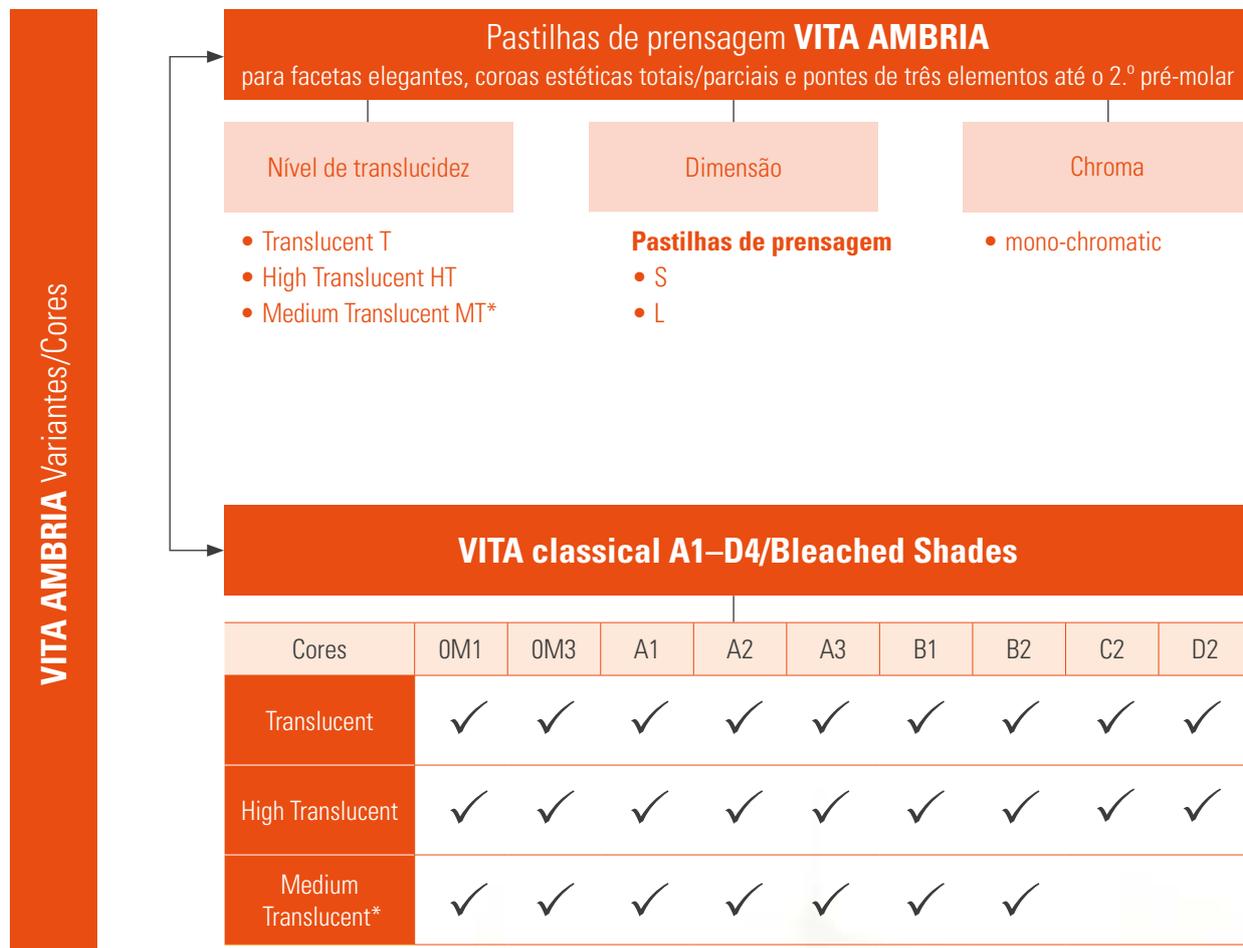

\*) Disponível a partir do terceiro trimestre de 2020



## COMPONENTES DE Prensagem HARMONIZADOS



### Massa de revestimento/Líquido

Massa de revestimento e líquido idealmente harmonizados para as pastilhas de prensagem VITA AMBRIA, à base de fosfato e com capacidade de velocidade para um controle de expansão e fluidez exatos.

- VITA AMBRIA INVEST P: disponível como pacote de 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: disponível como frasco de 1 litro



### Sistema de mufla

Anel e base de mufla transparentes em forma de cone, para colocação e remoção fácil de objetos; adequado para todas as unidades de prensagem convencionais.

- VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM: disponível como sistema de mufla de 100 g e 200 g



### Êmbolo de prensagem

Êmbolo de prensagem descartável para um manuseio fácil, sem jateamento e pré-aquecimento demorados.


- VITA AMBRIA PLUNGER: disponível como pacote de 50 unidade (diâmetro de 13 mm)

## COMPONENTES DE SISTEMA DISPONÍVEIS



### Incluir

VITA AMBRIA INVEST P + F  
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

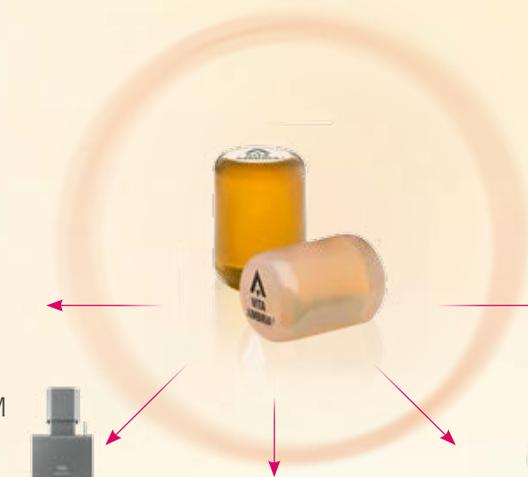

**Pigmentar/Aplicar glaze**  
VITA AKZENT PLUS.

### Prensagem

VITA VACUMAT 6000 MP  
VITA AMBRIA PLUNGER

### Polir

Instrumentos de polimento  
VITA SUPRINITY

### Recobrir

VITA LUMEX AC

## AS MELHORES SOLUÇÕES NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO



\*) Opcional: o recobrimento com VITA Lumex AC é uma etapa do processo opcional e não é necessária para o conceito de restauração monolítico.

## TEREMOS O PRAZER DE AJUDAR VOCÊ

Mais informações sobre os produtos e processamentos, você também encontra em [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



### Hotline do suporte de vendas

Para saber o status de pedidos, tirar dúvidas sobre entregas, bem como obter informações sobre produtos e materiais promocionais, o sr. Udo Wolfner e sua equipe de suporte ao cliente estarão a sua disposição.

► Fone +49 (0) 7761 / 56 28 84  
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99  
8:00 às 17:00 CET  
E-mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)



### Serviço de apoio técnico ao consumidor

Para questões técnicas sobre as soluções de produtos VITA, você pode contatar nosso consultor técnico Ralf Mehlin ou Daniel Schneider.

► Fone +49 (0) 7761 / 56 22 22  
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46  
8:00 às 17:00 CET  
E-mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)




Mais informações sobre o VITA AMBRIA você encontra em  
[www.vita-zahnfabrik.com/ambria](http://www.vita-zahnfabrik.com/ambria)

#### 1. Referências

##### 1. Pesquisas Internas, VITA P&D:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento  
Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Eng. Michael Gödiker, Chefe de Projeto P&D, Bad Säckingen

Para dados de testes detalhados, consulte a Documentação Técnico-científica  
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS  
Download no site [www.vita-zahnfabrik.com/ambria](http://www.vita-zahnfabrik.com/ambria)

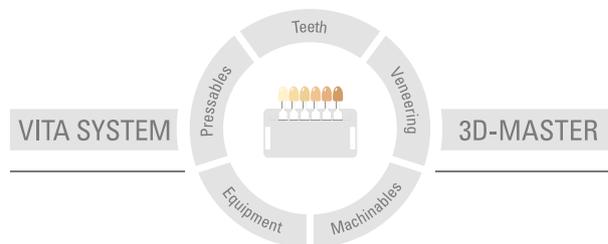

**Nota importante:** Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 11.19

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e vigente encontra-se em [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

A VITA Zahnfabrik é certificada e os seguintes produtos levam o selo **CE 0124** :

#### VITA AMBRIA®

Neste documento os produtos/sistemas mencionados de outros fabricantes são marcas registradas dos respectivos fabricantes.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)